



Linha Monobloco

Manual de Funcionamento, Garantia e Manutenção

☐ NEW ONE





Rodas Traseiras Removíveis

Posicione-se ao lado da cadeira, segure a roda próxima ao centro, aperte o botão do eixo e puxe o conjunto. Para colocar faça a operação inversa.

Encosto

Acionar o sistema pela faixa destravando as travas laterais.



Paralamas Laterais

Regule a altura desejada reposicionando o parafuso de "stop" na altura mais conveniente.

Freios

Afrouxe os parafusos da abraçadeira, posicione o freio no ponto de frenagem desejado.



Pedal

Afrouxe os parafusos que ficam atrás do tubo, mova o pedal para a altura desejada, em seguida aperte novamente.



Plataforma dos Pés

Afrouxe os parafusos, movimento até o ponto de inclinação ideal, em seguida aperte bem.

Assento e Encosto

Std fabricados em Nylon, acompanha almofada de 5cm.



Centro de Gravidade

Fixo 5cm , posicionado no sistema T-LOOCK

Distância da Roda Traseira em Relação a Cadeira

Afrouxe os parafusos da abraçadeira de fixação, remova o eixo de uma das rodas, insira dentro da bucha receptora puxe para fora até a distância desejada, em seguida aperte bem os parafusos.



Removendo o Garfo

Para dar manutenção e ajuste no garfo das rodas dianteiras proceda com afrouxamento do parafuso sextavado na parte superior, em seguida remova o garfo.

Roda Dianteira

Para lubrificar e remover fios de cabelos que enrolam entre o garfo e os rolamentos, remova os parafusos laterais que prendem a roda no garfo, limpe e remova toda a sujeira em seguida reponha o conjunto.



*Tolerância de Peso: 100 Kg

DICAS DE MANUTENÇÃO PARA BOA CONSERVAÇÃO DE SUA

ITEM	FREQUÊNCIA	PROCEDIMENTO
CALIBRAGEM DO PNEU	QUINZENAL	90 LBS PARA PNEUS TUBULARES - 60 LBS PARA PNEUS COMUNS
LUBRIFICAÇÃO DOS EIXOS REMOVÍVEIS DAS RODAS	MENSAL	UTILIZAR ÓLEO SPRAY WD-40 E PANO SECO
RODINHAS DIANTEIRAS	MENSAL	REMOVER FIOS E CABELOS UTILIZANDO OLEO SPRAY WD-40 E PANO SECO
FREIOS	MENSAL	UTILIZAR FERRAMENTAS INDICADAS E FAZER O AJUSTE COM OS PNEUS CALIBRADOS
TAPEÇARIA	ANUAL	TROCAR PELA ORIGINAL
PNEUS TRASEIROS	ANUAL	DAR PREFERÊNCIA PELO ORIGINAL INDICADO PELO FABRICANTE
RODINHAS DIANTEIRAS	ANUAL	DAR PREFERÊNCIA PELA ORIGINAL INDICADA PELO FABRICANTE
ROLAMENTOS	SEMESTRAL	DAR PREFERÊNCIA PELO ORIGINAL INDICADO PELO FABRICANTE
RODAS TRASEIRAS	SEMESTRAL	OBSERVAR TENSÃO DOS RAIOS E EMPENO

SUA CADEIRA É COBERTA PELAS SEGUINTE GARANTIAS

Serão válidas a partir da data de emissão da NF de venda ao consumidor.

02 Anos* para estrutura tubular. (*para quebra da estrutura desde que a ocorrência não seja devido à força destrutiva decorrente de mal uso ou impactos ocasionados por acidente).

06 Meses* (*para peças e componentes que apresentem mal funcionamento mecânico ou defeito de fábrica).

Pintura: 01 Mês* (*para descascamento precoce identificado dentro de um mês de uso, não daremos garantia contra riscos naturais de contato ou atrito da cadeira com outros objetos).

Pneus, câmaras de ar, tapeçaria ou estofamento, (*possuem garantia caso o defeito seja apresentado nos primeiros 15 dias de uso e claramente serem identificados defeito de fabricação).

EXCLUSÃO DA GARANTIA

-PNEUS E CÂMARAS DE AR QUANDO NÃO DETECTADOS NO ATO DO RECEBIMENTO OU ATE UMA SEMANA DE USO
 -TAPEÇARIA (ASSENTO - ENCOSTO - ALMOFADA) POR DANOS CAUSADOS POR SOBREPESO OU UMIDADE CAUSADA POR INCONTINÊNCIA URINÁRIA
 -RUPTURA DE PARTES DA ESTRUTURA OCASIONADOS POR IMPACTO OU MAU USO DO EQUIPAMENTO
 -USO INDEVIDO DO EQUIPAMENTO PARA PRÁTICA ESPORTIVA, LAZER RADICAL, TOMAR BANHO NA CADEIRA DE USO DIÁRIO, USO NA PRAIA E AREIA, SALINIZAÇÃO DE BEIRA MAR, OU USO IMPRÓPRIO AO QUE SE DESTINA O PRODUTO
 -CONSERTOS OU MODIFICAÇÕES FEITAS SEM PRÉVIO AVISO EM LOCAIS NÃO CREDENCIADOS PELO FABRICANTE
 -INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE FISCAL, SOLICITE SEMPRE A NOTA FISCAL, ELA SERÁ O DOCUMENTO NECESSÁRIO PARA VALIDARMOS SUA GARANTIA
 -REMOÇÃO OU VIOLAÇÃO DOS SELOS DO NÚMERO DE SÉRIE E INMETRO FIXADAS NA CADEIRA NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO

FORMAS DE ARMAZENAMENTO

-Não armazenar a cadeira em locais molhados ou úmidos
 -Não armazenar a cadeira em locais aberto (sobre o sol) por um longo tempo
 -Não armazenar a cadeira em locais onde possui areia ou que está propício a receber areia
 -Não armazenar a cadeira em rampas
 -Não armazenar em locais que possua produtos pontiagudo no chão
 -Não armazenar a cadeira em locais de carga ou descarga
 -Não armazenar a cadeira em locais alto ou que possa ocorrer uma queda
 -Não armazenar a cadeira deitada ou a estrutura da cadeira no chão sem proteção
 -Não armazenar a cadeira inclinada tanto para frente quanto para trás
 -Não armazenar a cadeira de lado



Fabricada no Brasil

(62) 3288-5741 | www.smartcr.com.br

Av. Center, N° 1.321, Qd. 02, Lt. 09 - Resid. Center Ville

Goiânia-GO - CEP: 74.369-003 - atendimento@smartcr.com.br